

FR

TEST DE GROSSESSE

blue diag[®]



Fiable à +99%

dès le **1^{er} jours**

de retard des règles

Réf : AX-PT20/1P



LABORATOIRES[®]
AXAMED

COMMENT FONCTIONNE LE TEST DE GROSSESSE BLUEDIAG® AX-PT20/1P ?

Le corps d'une femme enceinte produit une hormone appelée HCG (Human Chorionic Gonadotropin – Gonadotrophine chorionique). La sécrétion de cette hormone augmente durant le premier trimestre de la grossesse. On retrouve cette hormone dans l'urine.

Dès le 1^{er} jour présumé des règles, **Bluediag®** permet de détecter rapidement et extrêmement sensiblement la présence de l'hormone HCG dans les urines.

AVANT DE COMMENCER

1. Lisez attentivement cette notice dans son intégralité. **N'ouvrez la pochette protectrice que lorsque vous êtes prête à effectuer le test.** Ce test est à usage unique.
2. N'utilisez pas le test si la date de péremption indiquée sur l'emballage est dépassée. Le résultat peut être faussé.
3. Stockez le produit à température ambiante 4 - 30°C (40-86°F). Ne pas le congeler.
4. Le test peut être utilisé à toute heure de la journée, mais les premières urines du matin contiennent la concentration d'hormone HCG la plus élevée.
5. Utilisation de diagnostic in vitro - Ne pas introduire dans le corps.
Attention : boire trop d'eau avant de faire le test peut affecter ses résultats.

INSTRUCTIONS


1. Sortez le test de sa pochette protectrice.
2. Retirez le capuchon rose qui recouvre la mèche absorbante (*Figure 1*).

Figure 1



3. Placez la mèche sous un jet d'urine pendant environ 10 à 15 secondes pour permettre une absorption optimale de l'urine (*Figure 2*). Vous pouvez également recueillir vos urines dans un récipient puis immerger la mèche pendant 10 à 15 secondes.

Figure 2

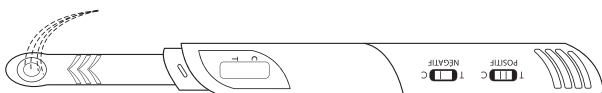

4. Repositionnez le capuchon rose sur le bâtonnet-test et posez-le sur une surface plane, fenêtres de résultat face à vous (Figure 3). Le résultat du test peut être altéré si le capuchon n'est pas remis en place.

Figure 3



INTERPRÉTATION DU TEST

1. La lecture du résultat se fait après 3 à 5 minutes. Ne pas l'interpréter au-delà de 5 minutes.
2. Une ligne rose apparaît à droite sur la fenêtre témoin. Sa présence atteste du bon fonctionnement du test. C'est la Bande de Contrôle (C).
3. La section gauche de la fenêtre indique le résultat du test. Si une autre ligne rose apparaît à cet endroit, c'est la Bande-Test (T) qui atteste que le résultat est positif.

Résultat positif : la présence de 2 lignes roses, peu importe si la Bande-Test est apparue avant la Bande de Contrôle, signifie que vous êtes enceinte (Figure 4).

Résultat négatif : la présence d'une seule ligne rose (Bande de Contrôle) sur la fenêtre signifie que vous n'êtes pas enceinte et que le test a correctement fonctionné (Figure 4).

Résultat non valide : une fois le test réalisé, si aucune ligne rose n'est apparue sur la fenêtre, cela signifie que le test n'a pas bien fonctionné. Les instructions n'ont peut-être pas correctement été suivies, le test a été perturbé. Vous devez alors recommencer le test en utilisant un nouveau test de grossesse **Bluediag®** en suivant minutieusement les instructions (Figure 4).

Figure 4



Important : La ligne indiquant un résultat positif sera visible. Parfois une ligne est plus foncée que l'autre. Même si une ligne est d'une couleur rose-clair, le résultat est tout de même positif.

LIMITES DU TEST

Le test de grossesse est à usage unique. Il est fiable si les consignes sont respectées. Bien que le test détecte une grossesse avec précision, une marge d'erreur (positive quand aucune grossesse n'est en cours ou négative quand la grossesse est réelle) peut se produire. Demandez l'avis de votre médecin en cas de résultats inattendus ou incohérents. Les contraceptifs oraux, les calmants, les antibiotiques ou d'autres médicaments courants n'affectent en rien le résultat de ce test.

QUESTIONS-RÉPONSES

Q : quand puis-je faire le test ?

R : le moment choisi pour réaliser ce test de grossesse est primordial si vous souhaitez obtenir un résultat fiable. Le test de grossesse **Bluediag®** peut être effectué à tout moment de la journée, mais c'est au moment du réveil que les urines sont les plus concentrées et présentent un taux élevé de HCG.

Il est conseillé de ne pas trop boire d'eau avant un test de grossesse afin de ne pas diluer votre taux de Béta HCG.

Q : si je vois apparaître deux lignes et que la ligne de test est plus foncée que l'autre, suis-je enceinte ?

R : oui. Si la ligne de test (**T**) est plus foncée que la ligne de contrôle, le résultat est positif.

Q : le résultat peut-il changer après avoir été le même pendant une certaine durée ?

R : le résultat affiché dans les 5 minutes suivant le test est fiable à 99%. Après 10 minutes et pour éviter toute erreur, le résultat ne doit pas être interprété (marque de tests, coloration accentuée suite à l'évaporation de l'humidité de l'urine).

Q : si le résultat du test est négatif, que dois-je faire ?

R : un résultat négatif signifie qu'aucune hormone de grossesse n'a été détectée dans vos urines. Attention, un test effectué trop tôt ne permet pas toujours de déceler une grossesse récente. Si vos règles n'apparaissent pas dans la semaine suivant le test, vous avez peut-être mal calculé la date de vos règles. Répétez alors le test. Si le deuxième test est toujours négatif et que vous n'avez toujours pas vos règles, consultez votre médecin.

Q : est-ce que le résultat peut être faussé ?

R : les fausses réponses positives sont très rares. Ceci ne devrait pas se produire si vous suivez correctement les consignes. Cependant, certaines maladies, certains traitements médicaux ou si du sang est présent dans vos urines, les résultats peuvent être faussés. Si vous obtenez à plusieurs reprises des résultats inattendus, consultez votre médecin pour confirmer le résultat.

Fiabilité scientifiquement prouvée, **Bluediag®** permet de détecter une grossesse dès le 1^{er} jour de retard de retard des règles. Sensibilité : 20UI/l. Cette boîte comprend 1 test de grossesse **Bluediag®** modèle AX-PT20/1P.

Ce test est un autodiagnostic à usage in vitro, conçu spécialement pour une utilisation personnelle à domicile. À conserver à une température ambiante de 4 à 30°C. Tenir hors de portée des enfants.

FR Le Test de Grossesse **Bluediag®** Modèle AX-PT20/1P est une marque et un modèle déposé.

Références

- (1) Aziz K, "Sensitivity and Specificity of Pregnancy Tests," Am Clin Lab, 1989, 8:12, 5-6.
 - (2) Christensen H, Thyssen HH, Schebye O, et al, "Three Highly Sensitive 'Bedside' Serum and Urine Tests for Pregnancy Compared," Clin Chem, 1990, 36(9): 1686-8.
 - (3) Fields SA and Toffler WL, "Pregnancy Testing-Home and Office," West J Med, 1991, 154(3):327-8.
 - (4) Hohnadel DC and Kaplan LA, "Hormones and Their Metabolites; B-HCG (B-Human Chorionic Gonadotropin)," Clinical Chemistry – Theory, Analysis, and Correlation, 2nd ed, Kaplan LA and Pesce AJ, eds, St Louis, MO: Mosby-Year Book Inc, 1989, 938-44. Lee T, "Human Chorionic Gonadotropin Assays and Their Uses," Obstet Gynecol Clin North Am, 1988, 15:457-75.
-

Distribué par :

 **Laboratoires AXAMED® SAS**

10, rue Mesnil

75116 PARIS

contact@axamed-lab.com

Réf : AX-PT20/1P



© 06/2020

Bluediag® est une marque déposée. Le fabricant se réserve le droit de modifier les photos et caractéristiques sans avis préalable. Modèle déposé.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : 07/2013